

ProphyCare™

By DIRECTA

Directa Produkte sind entwickelt, getestet und bewertet von unseren ausgewählten Team von hochqualifizierten und renommierten schwedischen und internationalen Zahnärzten mit dem Ziel, wdie Arbeitsschritte des Behandlers einfacher schneller und sicherer zu machen.

ProphyCare™

Directa Produkte sind entwickelt, getestet und bewertet von unseren ausgewählten Team von hochqualifizierten und renommierten schwedischen und internationalen Zahnärzten mit dem Ziel, die Arbeitsschritte des Behandlers einfacher schneller und sicherer zu machen.

DIRECTA
directadental.com



DIRECTA
Porschestr. 16 D
92245 Kümmerbruck
info@directadental.com

DIRECTA
directadental.com



ProphyCare™ Prophy Paste CCS verschiedenen Körnungen für alle Anforderungen

Prophy Paste CCS ist unübertroffen in Leistung, Handhabung und Dosierung. Die einzigartige nicht spritzende, homogene Formel trocknet nicht aus. Starke Beläge von Plaque und Verfärbungen sind leicht zu entfernen. Ein leichter Minzigeschmack und Glättegefühl nach jeder Behandlung. In gut dosierbaren farbcodierten Tuben und Einzeldosen in 4 verschiedenen Körnungen von grob bis extra-fein erhältlich. Enthält 0,1% Fluorid.

“Der perfekte Starter,
für wirksame Entfernung
von hartnäckigen
Belägen”



ProphyCare™ Prophy Paste CCS
RDA 250, Blue Coarse

Prod No: 731113 Prophy Paste CCS Tubes, 96g 60ml
Prod No: 690123 Prophy Paste CCS Single Dose, 144 x 2 gram

- Starter
- Für starke Beläge und hartnäckige Schichten von Plaque
- Effektive Entfernung von hartnäckigen Flecken verursacht zB. durch Kaffee, Tee, Tabak, etc.
- Schleifmittel: Bimsstein
- Enthält 0,1% Fluorid
- In Kombination mit weiteren Prophy Pasten CCS

“Weniger Schleifmittel,
aber dennoch
hoch wirksam“



ProphyCare™ Prophy Paste CCS
RDA 170, Green Medium

Prod No: 731114 Prophy Paste CCS Tubes, 97g 60ml
Prod No: 690122 Prophy Paste CCS Single Dose, 144 x 2 gram

- Anwendung bei schwächeren Belägen, falls die grobkörnige Prophy Paste nicht erforderlich ist.
- Effektive Entfernung von Belägen, verursacht z.B. durch Kaffee, Tee, Tabak, etc.
- Schleifmittel: Bimsstein
- Enthält 0,1% Fluorid
- In Kombination mit weiteren Prophy Pasten CCS

“Ober-
flächen-
schonende
Politur”



ProphyCare™ Prophy Paste CCS
RDA 120, Red Fine

Prod No: 731112 Prophy Paste CCS Tubes, 84g 60ml
Prod No: 690121 Prophy Paste CCS Single Dose, 144 x 2 gram

- Zur Entfernung von Plaque und leicht verfärbten Oberflächen
- Geeignet für Implantate
- Zum Polieren von Füllungen
- Schleifmittel: Kieselsäure
- Enthält 0,1% Fluorid
- In Kombination mit weiteren Prophy Pasten CCS

“Ideal
für
Endpolitur”



ProphyCare™ Prophy Paste CCS
RDA 40, Yellow Extra Fine

Prod No: 731111 Prophy Paste CCS Tubes, 84g 60ml
Prod No: 690120 Prophy Paste CCS Single Dose, 144 x 2 gram

- Für abschließendes Polieren der Zähne und Füllungen
- Für Kinderzahnheilkunde
- Geringer Abrieb, schonend für Patienten mit zervikaler Läsionen
- Ideal zum Polieren von Implantaten
- Gibt eine glatte Oberfläche
- Ideal nach Airflow-Behandlung, etc.
- Schleifmittel: Kieselsäure
- Enthält 0,1% Fluorid
- In Kombination mit weiteren Prophy Pasten CCS

#1 Maximale Hygiene

Immer frisch versiegelte Verpackung
Kein Risiko von Kreuzkontaminationen
höchste Hygienegarantie für Patienten.

4 Gründe für Prophy Paste CCS Single Dose

#2 Haftgrund

Die Einzeldosen sind mit einem
Klebeboden auf dem Handschuh
oder einer anderen Oberfläche
zu fixieren.

#3 Kein Abfall

Die Einzeldose Prophy Paste CCS kann restlos und ohne
Rückstände entnommen werden. Die flache Verpackung
mit abgerundeten Kanten ist so konzipiert, Rückstände zu
vermeiden. Der gesamte Inhalt kann einfach und restlos
entnommen werden.

#4 Perfekte Größe

Enthält die ideale Dosierung für
einen Poliervorgang.

ProphyCare™ Prophy Paste CCS Single Dose Blue, Green, Red & Yellow

Erhältlich in Mix oder Nachfüllpackungen
Prod No: 690119 Mix 144 Einzeldosen x 2 Gramm


- Prophy Paste CCS - ab sofort in Einzeldosis 2 mg Tassen
- Nicht-spritzende Formel
- Fluorid freisetzend
- Maximale Hygiene
- Milder Minzgeschmack
- Einfach zu spülen
- Die Einzeldose ist mit einem Klebeboden auf dem Handschuh oder einer anderen Oberfläche zu fixieren
- Packungen von 144 Stück, in Einzel- oder gemischter Körnung erhältlich
- Beiliegende Indexkarte zur einfachen Zuordnung der passenden Körnung
- Die Einzeldosen ist mit einem Klebeboden auf dem Handschuh oder einer anderen Oberfläche zu fixieren
- Umweltfreundliche Verpackung



Prophy Paste CCS Einzeldosen sind als Sortiment oder Nachfüllpackungen in Einzelkörnung erhältlich. Die in jeder Box enthaltene Indexkarte erleichtert die Auswahl der geeigneten Körnung. Die Einzeldosen sind übersichtlich verpackt. Wählen Sie Prophy Paste CCS je nach der Grad der Verfärbung, Dentin oder Zement, ästhetischen und anderen Füllungsmaterialien, etc. Verwenden Sie mindestens zwei verschiedenen Prophy Paste CCS RDA-Werte für jede Behandlung - RDA 250 und / oder RDA 170 zur Reinigung und RDA 120 und / oder RDA 40 zum Polieren.



Öffnen Sie die Verpackung, entfernen Sie den Schutzstreifen von der Klebasis und platzieren Sie die Dose auf dem Handschuh ...

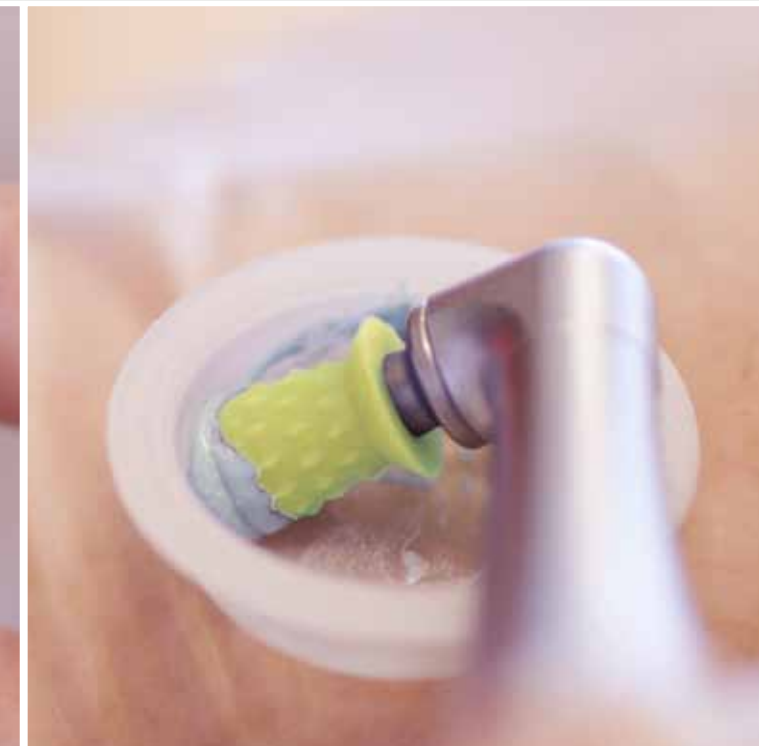

...oder auf jedem anderen Untergrund. Die Einzeldose Prophy Paste CCS kann restlos und ohne Rückstände entnommen werden. Die flache Verpackung mit abgerundeten Kanten ist so konzipiert, Reste zu vermeiden. Der gesamte Inhalt kann einfach und restlos entnommen werden.


Auswahlhilfe ProphyCare™ Prophy Paste CCS

	Blue RDA 250	Green RDA 170	Red RDA 120	Yellow RDA 40
Starter	●	●		
Stark verfärbte Oberflächen	●			
Starke Plaque	●	●		
Verfärbte Zähne		●		
Universal-Paste			●	
Kleine Mengen von Plaque			●	
Wurzeloberflächen			●	
Leicht verfärbte Zähne			●	
Füllungen			●	
Pädiatrischen				●
Zervikale Läsione durch Zahnbürstenabrieb				●
Implantate			●	●
Abschließendes Polieren			●	●
Nach Airflow-Behandlung			●	●


Wählen Sie die entsprechende Prophy Paste CCS je nach Verfärbungsgrad.

Für beste und lang anhaltende Ergebnisse Verwendung von mindestens zwei verschiedenen Prophy Paste CCS RDA-Werten für jede Behandlung - RDA 250 und / oder RDA 170 für die Reinigung und RDA 120 und / oder RDA 40 zum Polieren. Es wird empfohlen, jeweils einen separaten Polierkelch zu verwenden.

Eine homogene Mischung aus Schleifkomponenten sorgt für perfekte Ergebnisse

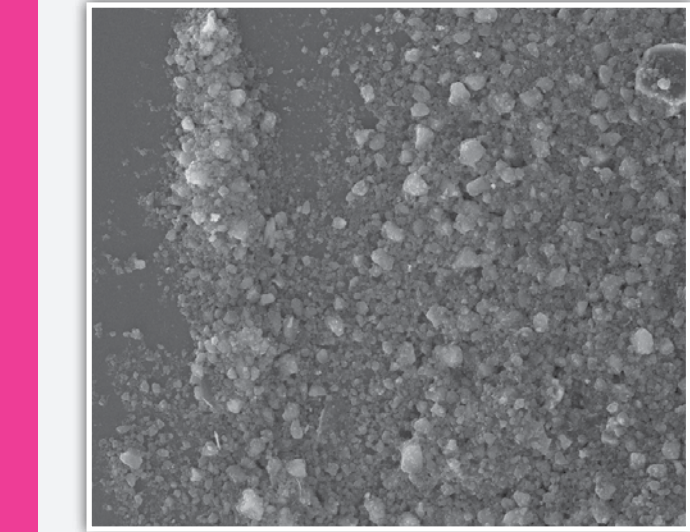

Elektronenmikroskopische Aufnahme; Prophy Paste CCS.

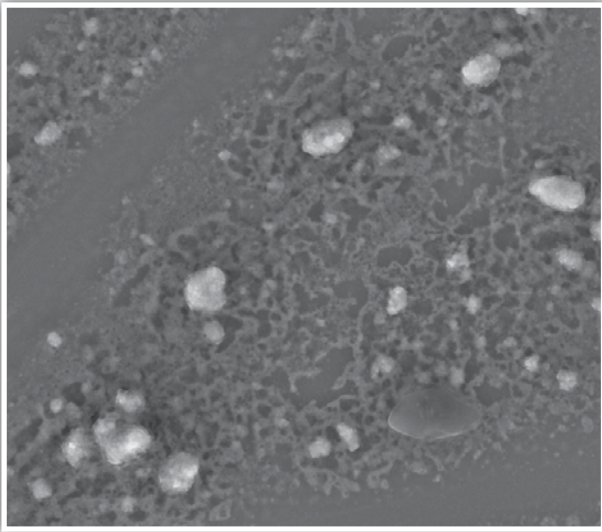

Elektronenmikroskopische Aufnahme von anderen Marken.

Eigenschaften ProphyCare™ Prophy Paste CCS

- Lieferung in farbcodierten Tuben oder Einzeldosen, erhältlich in 4 Körnungen von grob bis extra-fein
- Enthält 0,1% Fluorid. Unterstützt Kariesprävention
- Kann in Kombination mit Chlorhexidin verwendet werden
- Enthält Rizinusöl - unterstützt Vermeidung von Mundtrockenheit
- Optimiert für niedrigen Verbrauch
- Konsistenz: nicht spritzend durch homogene Zusammensetzung
- Lagerung in dem Poliercup, nicht spritzend oder austrocknend, keine Verflüssigung
- In Tuben oder Einzeldosis-Pakete
- Optimale Tubengröße - einfach zu dosieren, leicht zu reinigen, einfach zu lagern
- Milder Minzgeschmack
- Neutraler pH-Wert (5-6)





“Reinigen,
polieren
und
desensibilisieren“

PropyCare™ Propy Paste PRO Lila Universal

Prod No: 7411111 Propy Paste PRO Tuben, 84 g 60 ml
Prod No: 690125 Propy Paste PRO, Single Dose, 144 pcs, 2 Gramm

- Integrierte Abrieb-Variabilität**
Hohe Reinigungskraft der Propy Paste PRO wandelt sich in sanfte Polierefragmente.
- All in One-Verfahren**
Nur eine Paste für die Plaqueentfernung und für das abschließende Polieren nötig. Propy Paste PRO ist die All in One-Polierpaste für herausragende Reinigungs- und Polierergebnisse, mit kürzerer Behandlungszeit.
- Geringer Abrieb, trotzdem hervorragende Reinigungswirkung**
Niedriger RDA-Wert der Propy Paste PRO und abbaubare Reinigungsmittel kombinieren effektive Plaqueentfernung mit hervorragenden Polierergebnissen. Die glatte Oberfläche minimiert Oberflächenbindung.
- Desensibilisierung**
PropyPaste PRO enthält Desensibilisierungsmittel zum Verschließen der Dentinkanälchen und vermeidet Überempfindlichkeit. Optimal nach Skalierung.
- Remineralisierungsmittel**
Enthält Fluorid um den Zahnschmelz nach dem Polieren zu remineralisieren und unterstützt die Kariesprävention.
- Einfache Handhabung**
Kein Spritzen oder Verflüssigen. Erhältlich in Einzeldosen und Tuben.
- Hohe Patientenakzeptanz**
Der milde Minzgeschmack der Propy Paste PRO und die ansprechende Textur ist angenehm für Patienten aller Altersgruppen.

- Reinigt, poliert und desensibilisiert
- Enthält 0,1% Fluorid. Unterstützt die Kariesvorbeugung
- Kann in Kombination mit Chlorhexidin verwendet werden
- Enthält Rizinusöl - unterstützt die Schmierung von Mundtrockenheit
- Optimierte Konsistenz für niedrigen Verbrauch: die homogene Formel spritzt nicht, Verbleibt im Polierbecher, kein Austrocknung oder Verflüssigung
- Erhältlich in Tuben oder Portionspackungen
- Optimale Tubengröße - einfach zu dosieren, einfach zu reinigen, einfach zu lagern
- Milder Minzgeschmack
- Neutraler pH-Wert (5-6)


Auswahlhilfe PropyCare™ Propy Paste PRO

Reinigungs- und Polierpaste auf abbaubarer Kieselerdebasis, die selbsttätig von grob bis fein reduziert.


PropyCare™ Propy Paste PRO	
Starter	●
Sehr stark verfärbte Flächen	
Starke Schichten von Plaque	
Verfärbte Zähne	●
Universal-Paste	●
Kleine Mengen von Plaque	●
Wurzeloberflächen	●
Leicht verfärbte Zähne	●
Füllungen	●
Pädiatrisch	●
Implantate	●
Endpolitur	●
Nach Airflow-Behandlung	●

Der RDA Wert wird mit zwei Skalierungen, 10 und 100. PropyCare PRO ist mit der 10er und CCS PropyPaste mit der 100er Skala gemessen.

Eine homogene Mischung aus Schleifkomponenten sorgt für professionelle Ergebnisse

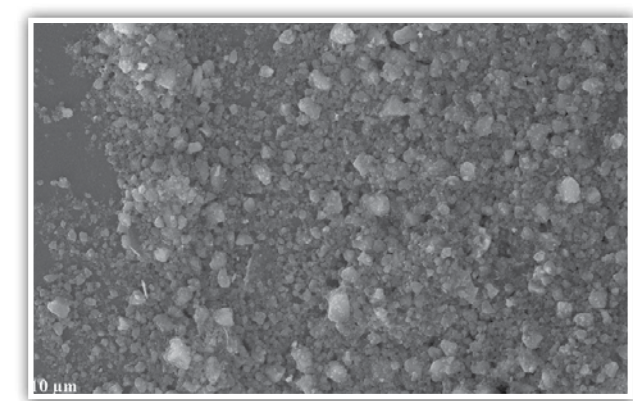

Electron Microscope Image; PropyCare™ Propy Paste PRO. Elektronenmikroskopische Aufnahme; PropyCare™ Propy Paste PRO.

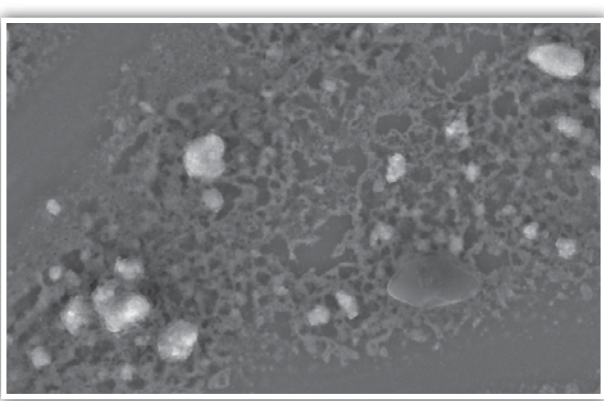

Typical Electron Microscope Image of other brands. Typische elektronenmikroskopische Aufnahme anderer Marken.

#1

Inneres Gurtband

Innestruktur Design minimiert Spritzen und erhöht die Reibung - zur effizienten Entfernung von Plaque.

4

Gründe für den Einsatz von ProphyCare™ Prophy Cups

#2

Außennoppen

Außennoppen optimieren die interaproximale Reinigung und den Spritzschutz. Weiche Konsistenz verbessert subgingivalen Zugang.

#3

Weicher Kelch

Weicher Kelch zum verbesserten subgingivalen Zugang und effizienter Plaqueentfernung.

#4

Schutzrand

Breiterer Kelch, um ein Eindringen der Prophy Paste in das Winkelstück zu vermeiden.

ProphyCare™ Prophy Cup Optimale Reinigung, überlegene Pastenhaftung am Polierinstrument

Prod No: 690131 Prophy Cups, Schraub-Typ, 144 Stk
Prod No: 690132 Prophy Cups, Latch-Typ, 144 Stk

- Die exklusive ProphyCare™ Cup formt sich den Konturen an, um bei der selektiven Entfernung von Plaque und der Interdentalreinigung mit weniger Druck, um Ermüdung des Behandlers vorzubeugen
- Optimierte Größe für schwer zugängliche Bereiche, mit Pastenhaltekapazität
- Weicher Rand für verbesserten subgingivalen Zugang - massiert sanft das Zahnfleisch und Taschen für eine effektive Plaque-Entfernung
- Das Innere Gurtband hält eine ausreichende Menge an Prophy Paste und minimiert das Spritzen
- Die Außenrippen optimieren die Polierwirkung
- Weiche, flexible 100% latexfreie Kautschuk Cups
- Breiterer Kelch, um ein Eindringen der Prophy-Paste in das Winkelstück zu vermeiden
- Geeignet für alle Oberflächen, zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern
- Ersetzt spitze Polierer
- Speziell für den Einsatz mit Prophy Paste CCS entwickelt
- Nur für den einmaligen Gebrauch. Cups sollten nach dem Gebrauch und beim Wechsel von Schleifmitteln zu kleinerer Körnung gewechselt werden
- Erhältlich in vibrationsfreiem Schraubentyp und Latch-Typ (rostfreier Stahl). Verpackung 144 Stück pro Box



Das Design des Gummi-Cup mit seinem erweiterten, weichen Rand erleichtert die Entnahme von Prophy Paste bis zum letzten Tropfen.



Das Innere Gurtband verstärkt Haltbarkeit und vermeidet Spritzen.


#1

Inneres Gurtband

Innestruktur Design minimiert Spritzen und erhöht die Reibung - zur effizienten Entfernung von Plaque.

4

Gründe für ProphyCare™ Prophy Angle

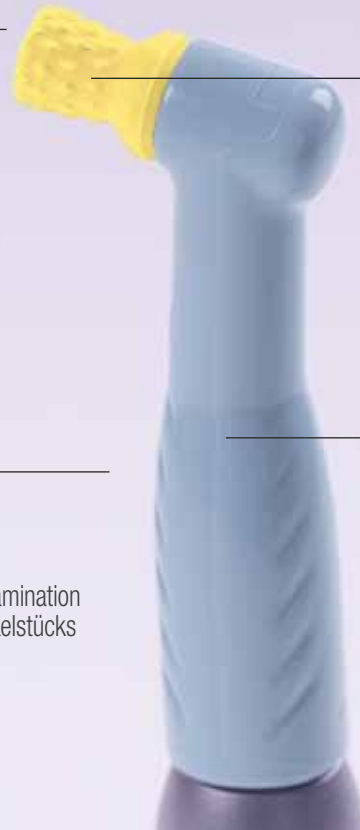

#2

Außennoppen

Außennoppen optimieren die interproximale Reinigung und den Spritzschutz. Weiche Konsistenz verbessert subgingivalen Zugang.

#3

Maximale Hygiene

Entwickelt, um das Risiko der Kreuzkontamination zu minimieren und die Wartung des Winkelstücks zu reduzieren.

#4

Ergonomisches Design

Schlanke Basis, ergonomischer Winkel und Rundkopf für bessere Sicht und Komfort Maximale Hygiene, mehr Komfort.

ProphyCare™ Prophy Angle Höchste Hygiene, Verbesselter Komfort.

Prod No: 690130 Prophy Angle, 144 Stück.

- Einweg-Prophy-Winkelstück aus Polycarbonat mit weichem, flexiblem 100% latexfreien Kautschuk-Cup, für Prophylaxe-Befestigungsstücke mit niedriger Geschwindigkeit
- Einzel verpackt, Einzelnutzung des Prophy Winkelstücks mit integriertem Gummi-Cup – keine Sterilisation des Metallwinkelstücks nach jeder Behandlung notwendig
- Keine Verunreinigung des Metallwinkelstückes, dadurch keine Beschädigungen
- Ergonomische Form mit einer schlanken Basis, einem runden Kopf und einem Winkel, der den Zugang zu hinteren Zähnen und den Patientenkomfort erleichtert, weniger Druck erforderlich, um Ermüdung des Behandlers vorzubeugen
- Das exklusive Design von ProphyCare™ Prophy Angle formt sich der Zahnkontur zur der selektiven Entfernung von Flecken und Interdentalreinigung an
- Optimierte Größe für schwer zugängliche Bereiche, mit Pastenhaltekapazität
- Weicher Rand für verbesserten subgingivalen Zugang - massiert sanft das Zahnfleisch und Taschen für eine effektive Plaque-Entfernung
- Das Innere Gurtband hält eine ausreichende Menge an Prophy Paste und minimiert das Spritzen
- Die Außennoppen optimieren die Polierwirkung
- Geeignet für alle Oberflächen, zur Behandlung von Erwachsenen und Kindern
- Ersetzt spitze Polierer
- Vibrationsfreie Laufruhe und somit keine Überhitzung
- Speziell für den Einsatz mit Prophy Paste CCS entwickelt
- Zum einmaligen Gebrauch. Bei Körnungswechsel auch Winkelstück wechseln
- Verpackt 144 Stück pro Box. Einzel verpackt



Polieren des Sulcus mit niedriger Geschwindigkeit, mit leichtem Druck und Bewegung.



Die ProphyCare™ Design ermöglicht sowohl Inter und subgingivale Reinigung.



Dosieren der benötigten Menge Propy Paste in der Einweg-FixyDap Cup. Klebt Rückstandsfrei auf jedem Untergrund, z.B. Handschuh oder einem Tablett.



ProphyCare™ Prophy Paste Tubes mit FixyDap™

Prod No: 411484 FixyDap™ 250 pcs

- Praktische und hygienische Alternative zu Prophy Paste Single Dose
- Einfache Befestigung am Tray oder Aufkleben am Handschuh, für jeden Haftgrund geeignet
- Einwegbecher, 250 Stück

ProphyCare™ poliertes lächeln garantiert!

Product Numbers

ProphyCare™ Prophy Paste CCS Tubes, supplied in multiples of 20

Prod No:	Product Description	Quantity
731113	Prophy Paste CCS Blue RDA 250, 125 micron	96g 60ml
731114	Prophy Paste CCS Green RDA 170, 70 micron	97g 60ml
731112	Prophy Paste CCS Red RDA 120, 20 micron	84g 60ml
731111	Prophy Paste CCS Yellow RDA 40, 2 micron	84g 60ml

Transport package 120 tubes

ProphyCare™ Prophy Paste PRO Tube, supplied in multiples of 20

Prod No:	Product Description	Quantity
741111	Prophy Paste PRO	102g 60 ml

Transport package 120 tubes

ProphyCare™ Prophy Paste CCS, Single Dose

Prod No:	Product Description	Quantity
690123	Prophy Paste CCS Blue RDA 250, 2 gram	144 single doses x 2 gram
690122	Prophy Paste CCS Green DA 170, 2 gram	144 single doses x 2 gram
690121	Prophy Paste CCS Red RDA 120, 2 gram	144 single doses x 2 gram
690120	Prophy Paste CCS Yellow RDA 40, 2 gram	144 single doses x 2 gram
690119	Prophy Paste CCS Mix, 2 gram	144 single doses x 2 gram

ProphyCare™ Prophy Paste PRO, Single Dose

Prod No	Product Description	Quantity
690125	Prophy Paste PRO Lilac, 2 gram	144 single doses x 2 gram

ProphyCare™ Prophy Angle

Prod No:	Product Description	Quantity
690130	Prophy Angle	144 pcs

ProphyCare™ Prophy Cups

Prod No:	Product Description	Quantity
690131	Prophy Cups, screw-in	144 pcs
690132	Prophy Cups, latch type	144 pcs

ProphyCare™ FixyDap

Prod No:	Product Description	Quantity
411484	FixyDap, disposable dappens	250 pcs

Transport package 18 boxes

