

Restorative

By DIRECTA

Die Produkte werden von unserem ausgewählten Team hochqualifizierter und angesehener schwedischer und internationaler Zahnärzte entwickelt, getestet und bewertet, mit dem Ziel die tägliche Arbeit in der Praxis für den Zahnarzt zu vereinfachen.

Design By Dentists™

Die Produkte werden von unserem ausgewählten Team hochqualifizierter und angesehener schwedischer und internationaler Zahnärzte entwickelt, getestet und bewertet, mit dem Ziel die tägliche Arbeit in der Praxis für den Zahnarzt zu vereinfachen.


DIRECTA
directadental.com



DIRECTA AB
Germany, Austria & Switzerland
Porschestrasse 16 D
92245 Kümmerbruck DEUTSCHLAND
Tel. +49 171 530 81 53
info@directadental.com

Head Office
P.O. Box 723,
194 27 Upplands Väsby, SWEDEN

DIRECTA
directadental.com

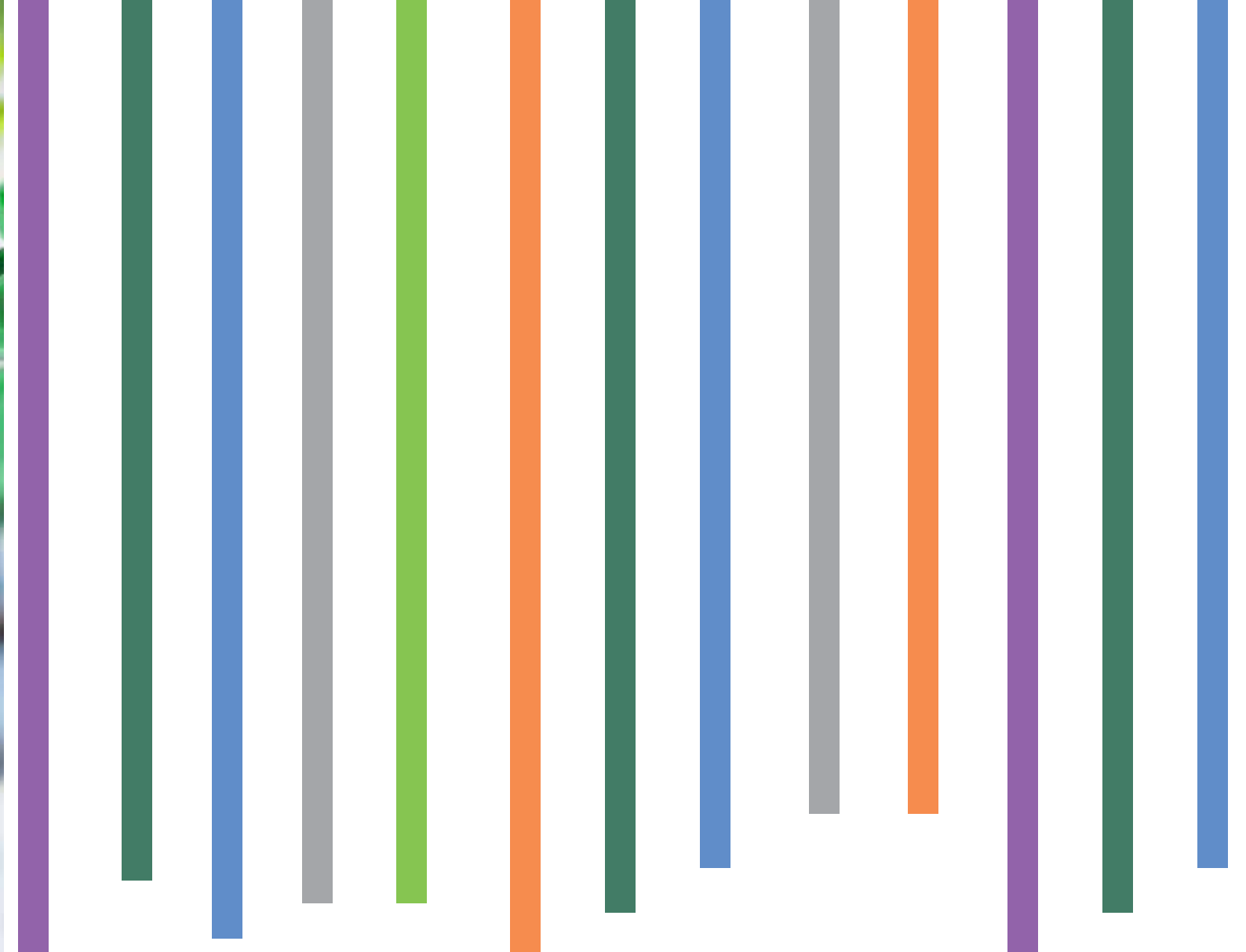

FenderWedge® & FenderMate® Intro-Kit

Prod No	Product Description	Quantity
602679	FenderWedge® & FenderMate® Intro-Kit FenderWedge X-small x 3pcs Small x 3pcs Medium x 1pc Large x 1pc and FenderMate Left Narrow x 8pcs Left Regular x 2pcs Right Narrow x 8 pcs Right Regular x 2pcs	8 & 20 pcs

Dental Fenders, Innovationen für sichere Präparation und Restauration.

2006 wurde mit FenderWedge das erste von 5 Fender Produkten produziert. Directa entwickelt Produkte zur Optimierung der Zahnheilkunde.

FenderWedge schützt Nachbarzähne während der Präparation. 70 % der ungeschützten Zähne werden während der Präparation beschädigt, folglich wird FenderWedge von bedeutenden Vortragenden weltweit empfohlen. FenderWedge - der „Präparationssicherheitsgurt“.

FenderWedge ebnete den Weg für FenderMate, eine einteilige Teilmaritze, die eine schnelle und effiziente Wiederherstellung mit vorgeformten Kontaktpunkt und einen dichten cervikalen Abschluss erzielt. Retentionsringe oder Matrizenhalter sind nicht mehr erforderlich.

FenderMate wurde für kleine und mittelgroße Kavitäten entwickelt.

Mit FenderMate Fix ist es jetzt auch möglich grössere Kavitäten zu restaurieren.

FenderWedge Prep wurde 2011 für größere Präparationen wie Kronen, Veneers und Inlays konstruiert.

FenderMate Prime erste Entwicklung einer Kindermatrize. Es wurde entworfen, um eine sanfte und schnelle Technik anzubieten, um Primärzähne vorzubereiten und wieder herzustellen.

FenderMate Temp ist die neue All-in One Lösung für sicheres und einfaches Präparieren und Füllen von Provisorien.

FENDERWEDGE®
Design by Dentists™



Beschädigung des Nachbarzahn bei Präparationen ist ein tägliches Problem in jeder Praxis.

Bei ca. 70 % aller Klasse II Füllungen wird der Nachbarzahn beschädigt.* FenderWedge verhindert häufig auftretende Beschädigungen des Nachbarzahn und der Gingiva während Klasse II Präparationen.*

* Qvist V, Johannessen L, Bruun M (J Dent Res 1992 Jul; 71 (7): 1370-3 Lussi A, Gygax M. (J Dent. 1998 Jul-Aug; 26 (5-6):435-41), Medeiros VA, Seddon RP (J Dent. 20000 Feb; 28 (2): 103-10))

4 Gründe für FenderWedge®

#1

Sichere Präparation

Schnelles und sicheres präparieren ohne Gewebebeschädigung.



#2

Schutz für Nachbarzahn

Das Schutzschild und der Keil schützen den Nachbarzahn.

#3

Vorseparierung

Die Vorseparierung erleichtert die Platzierung der Matritze und ist Grundlage für einen guten Kontaktpunkt.

#4

Schutz für Gingiva

Schutzschild und Keil helfen Gewebebeschädigung an der Gingiva zu vermeiden.


Schnelle und sichere Präparation

ohne Schädigung des Nachbarzahnes.


FENDERWEDGE®
Design by Dentists™




1. Platzierung eines FenderWedge von buccal oder lingual.

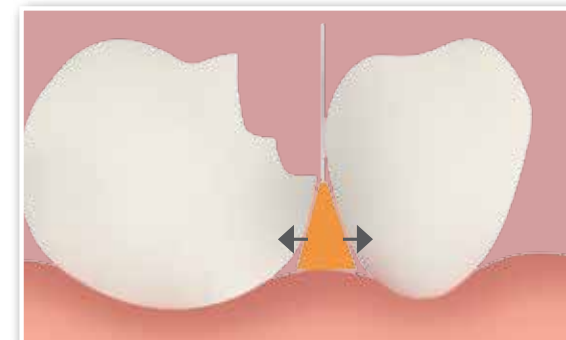

2. Separiert während der Präparation. Einmal platziert - Positionsbeständig

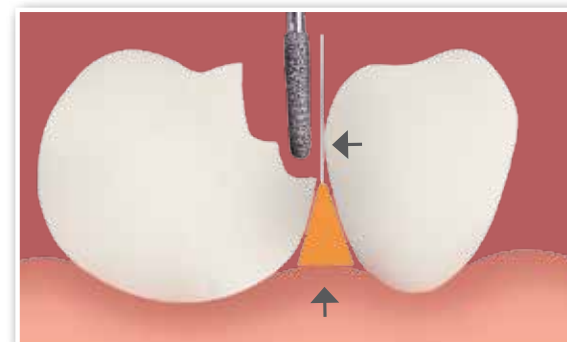

3. Schutz für Nachbarzahn und Gingiva.

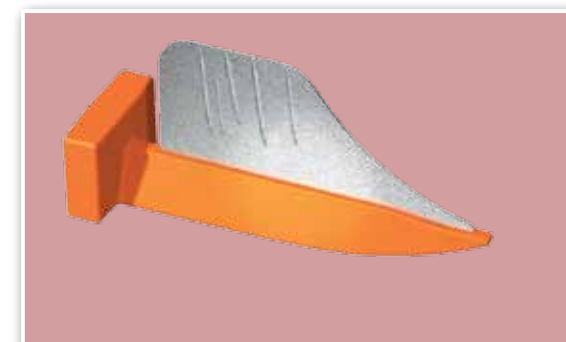

4. Beschädigtes Schutzschild.

Schützt den Nachbarzahn und Gingiva bei Klasse II Präparationen

Beschädigung des Nachbarzahnes bei Präparationen ist ein tägliches Problem in jeder Praxis. Bei ca. 70 % aller Klasse II Füllungen wird der Nachbarzahn beschädigt.* FenderWedge verhindert häufig auftretende Beschädigungen des Nachbarzahnes und der Gingiva während Klasse II Präparationen.*


FenderWedge ist eine Kombination aus Schutzschild und Kunststoffkeil. Im Interdentalraum platziert, schützt es Nachbarzahn und Gewebe und separiert die Zähne, welches die anschließende Matrizenplatzierung sehr erleichtert. FenderWedge sollte mit Floss gesichert werden.

* Qvist V, Johannessen L, Bruun M (J Dent Res 1992 Jul; 71 (7): 1370-3) Lussi A, Gygax M. (J Dent. 1998 Jul-Aug; 26 (5-6):435-41), Medeiros VA, Seddon RP (J Dent. 2000 Feb; 28 (2): 103-10))


FenderWedge®

Prod No	Product Description	Quantity
602750	Assortment	4x36 pcs
602751	Small, Orange	36 pcs
602752	Medium, Grün	36 pcs
602753	Large, Gelb	36 pcs
602754	X-small, Lila	36 pcs
602800	FenderWedge Value Pack, Orange	100 pcs
602801	FenderWedge Value Pack, Grün	100 pcs
602802	FenderWedge Value Pack, Gelb	100 pcs
602803	FenderWedge Value Pack, Lila	100 pcs


Large

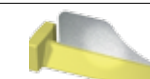


Medium

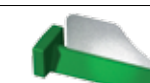

Small

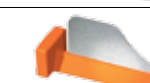

x-small

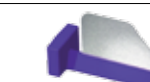

Lebensmittelechter Kunststoff (Polypropen) u. Farbstoff. Stahl, t= 0,08 mm
FenderMate ist ein registered trademark owned by Directa AB. Registered Design and Patent pending.



Bessere Präparation und Zeitersparnis dank verbesserter Sicht und Sicherheit

FenderWedge Prep schützt den Nachbarzahn und Gingiva bei der Präparation vor der Erstellung von Kronen, Veneers und Füllungen.

4 Gründe für FenderWedge® Prep

#1

Schutz des Nachbarzahns

Das Schutzschild und der Keil schützen den Nachbarzahn.



#3

Bootsförmige Keilspitze

Ermöglicht leichtes platzieren in enge Aproximalräume. Drückt sanft die Gingiva zurück und vermeidet Blutung.

#2

Sichere Kronen- und Veneerpräparation

Bessere und schnellere Präparation ohne den Nachbarzahn oder die Papille zu verletzen.

#4

Optimale Sicht und Arbeitsraum

Das Schutzschild ist seitlich biegsam um bessere Sicht und Zugang zu erhalten.

FenderWedge® Prep


Prod No	Product Description	Quantity
602749	FenderWedge Prep acc. Dr. Massironi, Grey	36 pcs
602811	FenderWedge Prep acc. Dr. Massironi, Grey Value Pack	100 pcs

Sichere Kronen- und Veneerpräparationen ohne Schädigung des Nachbarzahnes und des Paradontiums.

FENDERWEDGE®
PREP
Design by Dentists™



1. Platzierung von buccal oder lingual.

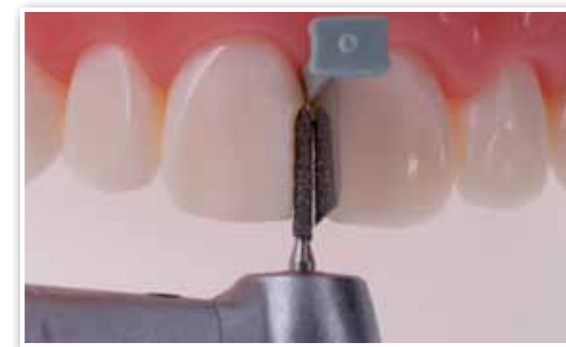

2. Präparation bei gesichertem Nachbarzahn und Gingiva



3. FenderPrep kann in allen Approximalräumen platziert werden.



4. Das Stahlplättchen ist perforiert und kann gebogen werden um bessere Sicht und Raum zu haben.

Schützt Zähne und Gingiva während der Präparation von Kronen und Veneers

FenderWedge Prep schützt den Nachbarzahn und Gingiva bei der Präparation vor der Erstellung von Kronen, Veneers und Füllungen.

FenderWedge Prep ist eine Kombination aus Schutzschild und Kunststoffkeil. Es verfügt über eine grazile und "bootsförmige" Spitze. Dadurch in enge Approximalräume platzierbar, bei gleichzeitigem Schutz des Nachbarzahns und Gingiva.

FenderWedge Prep kann bukkal oder lingual platziert werden. Das Schutzschild ist mit einer Perforation versehen, welche nach der Platzierung vorgebogen werden kann, so dass es sich fest gegen den angrenzenden zu schützenden Zahn neigt. Das sorgt für eine schnellere und sicherere Vorbereitung bei optimaler Sicht und Raum.

Regular



Lebensmittelechter Kunststoff (Polypropylen) u. Farbstoff. Stahl, t= 0,08 mm
FenderWedge Prep ist ein registered trademark owned by Directa AB. Registered Design and Patent pending.



Cervikale Überhänge sind Geschichte!

Wenn die Matrize nicht perfekt am Kavitätenboden anliegt kann das Überhänge verursachen welche bei der Kontrolle mittels Sonde oder Floss nicht festzustellen sind. Eine falsch platzierte Matrize kann die Ursache für einen zu kleinen Kontaktpunkt sein. Nach einer gewissen Zeit wird durch den oklusalen Druck überschüssiges Material abgebrochen. Diese Stelle verursacht starke Einlagerung von Speiseresten und Plaqueretention.


4 Gründe für FenderMate®

#1 Guter Kontaktpunkt und anatomische Form

Der vorgeformte Kontaktpunkt passt sich gut an der proximalen Oberfläche an.

#2 Kombiniertes Design

Kombination von Matrize und Keil für einfaches und sicheres platzieren.

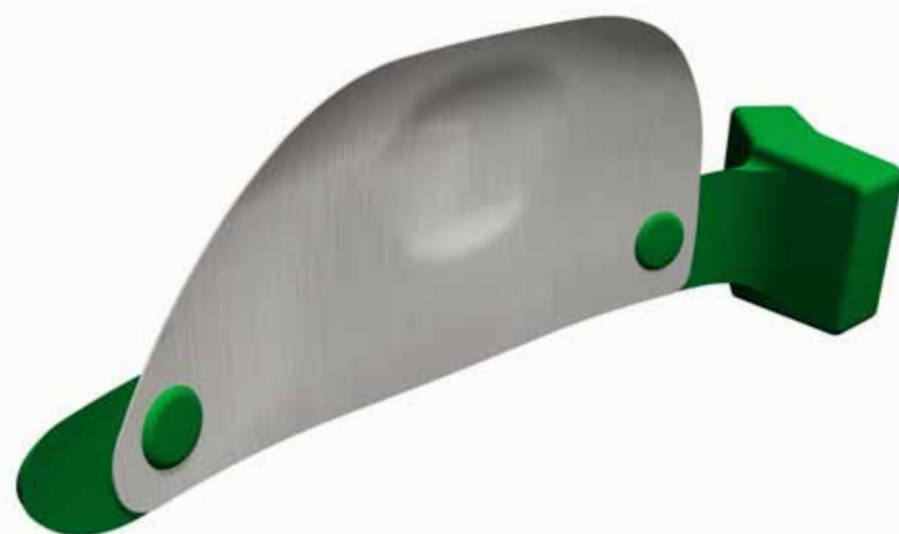

#3 Kein cervikaler Überhang

Der Seitenflügel übt Druck auf die Matrize für eine gute Separation aus und unterstützt die Bildung eines sauberen cervikalen Abschlusses.

#4 Entwickelt für minimalinvasive Zahnheilkunde

Kann interproximal mit minimaler Präparation platziert werden.

FenderMate®

Prod No	Product Description	Quantity
602770	Assortment	4x18 pcs
602771	Green, Left Regular	18 pcs
602772	Light Green, Left Narrow	18 pcs
602773	Blue, Right Regular	18 pcs
602774	Light Blue, Right Narrow	18 pcs
602804	FenderMate Value Pack, Green, Left Regular	100 pcs
602805	FenderMate Value Pack, Light Green, Left Narrow	100 pcs
602806	FenderMate Value Pack, Blue, Right Regular	100 pcs
602807	FenderMate Value Pack, Light Blue, Right Narrow	100 pcs

Die schnellste Teilmatrize?

100% cervikale Abdichtung & Kontakt in Sekunden!


FENDERMATE®
Design by Dentists™



1. Platzierung der Matrize unter der Präparation mit einer "abwärts-kurvigen" Bewegung.



2. Flexibler Flügel übt Druck für optimale Separation und cervikale Dichtigkeit aus und vermeidet Überhänge.

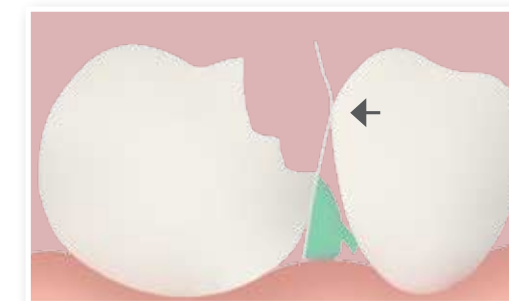

3. Die vorgeformte Kontur passt sich an und formt einen optimalen Kontaktpunkt.



4. Platziert in Sekunden zur Erstellung einer perfekten Füllung.

Sektionsmatrize für Klasse II Kompositfüllungen

FenderMate ist eine Kombination aus Sektionsmatrize und Keil. Das Design ermöglicht eine unkomplizierte Anwendung.

Die dem angrenzenden Zahn gegenüberliegende Seite des Keils ist mit einem "Druckflügel" versehen, welcher die cervikale Präparationskante stufenlos abdichtet. Zur Formung des Kontaktpunktes verfügt die Matrize über eine vorkonturierte Einkerbung, die einen natürlichen Kontaktpunkt ermöglicht.

Left Regular



Left Narrow



Right Regular



Right Narrow



Lebensmitteltauglicher Kunststoff (Polypropylen) u. Farbstoff. Stahl, t= 0,05 mm
FenderMate ist ein registered trademark owned by Directa AB. Registered Design and Patent pending.



Die neue All-in-One Lösung

Für sichere und einfache Präparation und Füllung von Provisorien. Nach der Präparation kann FenderMate Temp einfach um den Zahn gebogen werden. Dies erleichtert das präzise Füllen und vermeidet die Bildung von Überhängen an provisorischen Füllungen.

4 Gründe für FenderMate® Temp

#1 Entwickelt für provisorische Füllungen

Minimiert die Bildung von Überhängen und Blutungen.



#3 Einfache Platzierung

Erleichtert eine hervorragende, einfache und schnelle Behandlung.

#2 Biegbarkeit

Um die Zahnkontur biegsam um bessere anatomische Oberfläche zu erhalten, welche weniger Nacharbeit erfordert.

#4 Kombiniertes Design

Entwickelt zum Schutz bei der Präparation und Füllung für Provisorien aus allen Materialien.

FenderMate Temp®

Prod No	Product Description	Quantity
602786	FenderMate Temp, Lilac	36 pcs
602813	FenderMate Temp, Lilac Value Pack	100 pcs

Die neue All-in-One Lösung für sichere und einfache Präparation und Füllung von Provisorien.

FENDERMATE^{TEMP}
Design by Dentists™



1. Platzieren von FenderMate Temp buccal oder lingual. Präparieren der Kavität, während Nachbarzahn und Gingiva geschützt sind.



2. Anbiegen an die Zahnkontur, um eine bessere anatomische Oberfläche zu erhalten, welche weniger Nacharbeit erfordert.



3. Füllung der Kavität mit allen Materialien möglich.



4. Hervorragende provisorische Füllung – schnell und einfach.

Schutz und Matrize für provisorische Füllungen

FenderMate Temp ist die neue All-in-One Lösung für sichere und einfache Präparation und Füllung von provisorischen proximalen Restaurationen.

FenderMate Temp ist eine Edelstahlmatrize kombiniert mit einem Kunststoffkeil, welcher einfach vor der Präparation zu platzieren ist. Es schützt den anliegenden Nachbarzahn vor Beschädigung und minimiert die Blutung der Gingiva.

Nach der Präparation kann die Matrize einfach an die Zahnkontur angebogen werden. Vereinfacht eine präzise provisorische Füllung und minimiert das Problem von Überhängen und deren Folgen.

Wenn kein Kofferdamm benutzt wird, sollte FenderMate Temp mit Floss gesichert werden.

Regular



Food approved plastic (Polypropylene) and colour. Stainless Steel. t= 0,10 mm
FenderMate is a registered trademark owned by Directa AB. Registered Design and Patent pending.

FENDERMATE® PRIME
Design by Dentists™



Clinical Innovations Awards 2013
Winner
FenderPrime




Einfachere Präparation und Restauration bei indern

Eine einzigartige Kombination aus Präparationsschutz und
Sektionalmatrize für Klasse II Füllungen von Milchzähnen.

4 Gründe für FenderMate® Prime

#1 Für Milchzähne entwickelt

Die optimale Größe sichert beste Ergebnisse.

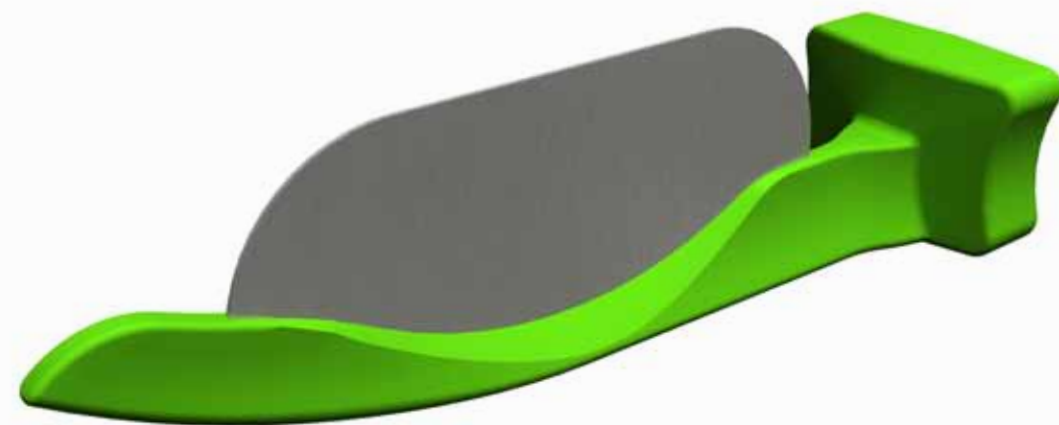

#2 Einfache Platzierung

Erleichtert eine hervorragende, einfache und schnelle Behandlung speziell bei Kindern.

#3 Kombiniertes Design

Entwickelt als Schutz während der Präparation und als Matrize für Klassell Füllungen bei Milchzähnen.

#4 Biegsam

Passt sich der Kurvatur des Zahnes an, für beste Ergebnisse und minimler Nacharbeit.

FenderMate® Prime

Prod No	Product Description	Quantity
602815	Assortment	2x18 pcs
602816	Short, Neon Yellow	18 pcs
602817	Long, Neon Green	18 pcs
602808	FenderPrime Value Pack, Short, Neon Yellow	100 pcs
602809	FenderPrime Value Pack, Long, Neon Green	100 pcs

Einfachere Präparation und Restauration bei Kindern.

FENDERMATE®
PRIME
Design by Dentists™



1. Platzierung von buccal oder lingual.



2. Präparation bei gesichertem Nachbarzahn und Gingiva



3. Anbiegen der Matrize an die Zahnkontur.*



4. Sicherung durch Floss.

Schnelle und einfache Matrize für Milchzähne

Eine einzigartige Kombination aus Präparationsschutz und Sektionalmatrize für Klasse II Füllungen von Milchzähnen. FenderMate Prime ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte und sichere Behandlung von Milchzähnen.

FenderMate Prime ist ein Kunststoffkeil mit einem Stahlblech zum Platzieren in enge Approximalräume. Die "Bootsform" der Spitze ermöglicht ein Zusammendrücken der Gingiva ohne diese zu beschädigen und reduziert das Blutungsrisiko. Vor dem Füllvorgang lassen sich Keil und Blech entsprechend den Konturen des Zahnes "anformen". Bei Bedarf lässt es sich einfach mit Zahnseide sichern.

*FenderMate Prime ist in zwei Größen, lang und kurz, erhältlich. FenderMate Prime grün (langer Keil) ist biegsam. FenderMate Prime mit kürzerem, stärkerem Stahlblech für enge Aproximalräume.

Long



Short



Lebensmittelechter Kunststoff (Polypropen) u. Farbstoff. Stahl, t= 0,08 mm
FenderMate Prime ist ein registered trademark owned by Directa AB. Registered Design and Patent pending.



CoForm™
Für provisorische und dauerhafte Klasse IV Composite Füllungen.

CoForm ist ein einzigartiges Matrizensystem aus vorgeformten, durchsichtigen Celluloid-Schalen speziell für Composite Klasse IV Füllungen, sowie verschiedenen Zahnfrakturen.

Die Verfahrensweise und Vorteile von Celluloid Kunststoff Matrizen. Die Kavität wird wie gewöhnlich geschichtet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass bei der letzten Schicht die CoForm Matrizte auf das ungehärtete Composite gedrückt wird und somit die fertige Zahnanatomie wieder gibt. Anschließend kann das Material durch die durchsichtige Matrizte ausgehärtet werden.


- Vier verfügbare Größen in Fertigform für mesiale und distale Ecken
- Überträgt Druck um Komposit in Kavitäten und angeätzten Kanäle zu formen
- Passt sich der Zahnform des Patienten an und ergibt somit eine natürlich aussehende Restauration
- verbindet sich nicht mit Komposit

CoForm™

Prod No	Product Description	Quantity
604034	Assortment B: 11M/D, 21M/D, 12M/D, 22M/D	64 pcs
604035	Assortment A: 1 of each refill	128 pcs
604036 - 51 Refills	Siehe folgende Liste	8 pcs

Product No's for refill packages supplied in multiples of 10

Prod No	Product Description
604036	11 Mesial
604037	11 Distal
604038	21 Mesial
604039	21 Distal
604040	12 Mesial
604041	12 Distal
604042	22 Mesial
604043	22 Distal
604044	13 Mesial
604045	13 Distal
604046	23 Mesial
604047	23 Distal
604048	31-32 Mesial
604049	31-32 Distal
604050	41-42 Mesial
604051	41-42 Distal

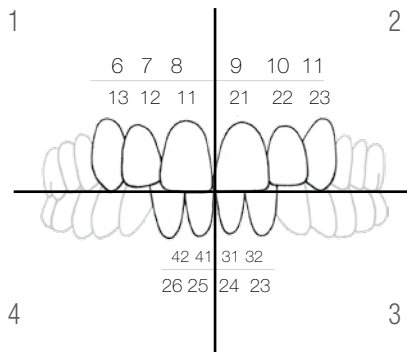

4 Gründe für ProxyPal® 3D Matrix

#1 Individuelle Kurvatur

Die ausgeprägte Kurvatur ist individuell für eine korrekt Schliessung von Diastema-Fällen. Durch ziehen/schieben der Matrize ist es einfach die passende Position für den einzelnen Zahn zu finden.

#2 Raffinierte Kurvatur

Die Kurvatur ist fein zulaufend um eine optimale Schliessung der öffnung zum Kiefer hin zu gewährleisten.

#3 Cervikale Ecken

Die cervikalen Ecken formen einen künstlichen Zahnschmelz um die „black triangle disease“ zu schliessen. Die cervikale Kante hält Feuchtigkeit und Speichel aus dem umgebenden Gewebe, die den Hohlraum verunreinigt, zurück.

#4 3D Matrizenkontur

Eine Matrize für alle Frontfüllungen, dank der zulaufenden Kontur.

Speziell entwickelt für Schließen von Diastema und die Behandlung von schwarzen Dreiecken. /Directa

Prod No	Product Description	Quantity
604092	ProxyPal 3D Anterior Matrix	36 pcs



1. Indikationen für die Anwendung: Klasse IV Füllungen, Grosse Klasse III Füllungen, Schliessen von Diastema.



2. Vorsichtigs anbringen des Matrizenbandes das die Kante in die Zahnücke zeigt. Durch schieben und ziehen die ideale Position für ein bestes Ergebnis finden. Die Kontur stabilisiert das Matrizenband während der Füllung.



3. Das Band kann durch Biegen um die palatinale Seite des Zahnes und platzieren im benachbarten Interdentalraum fixiert werden. Diese Technik kann auch am Nachbarzahn angewendet werden, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

ProxyPal®
Design by Dentists™

Die zulaufend vorgeformte Kurvatur unterstützt ästeische, incisale Füllungen mit korrekter anatomischer Oberfläche zu erstellen.

Die proximale Krümmung unterscheidet sich von Zahn zu Zahn. Um eine perfekte Füllung zu erhalten ist die Matrize so konzipiert, dass die Krümmung entlang ihrer Gesamtlänge von kleiner zu grosser Kurvatur zuläuft. Auf der einen Seite ist die Krümmung so fein strukturiert, dass sie ideal für die Unterkieferschneidezähne ist. Am anderen Ende der Matrize ist die Krümmung grösser, und eignet sich für einen ästhetischen Lückenschluss. Durch schieben/ziehen der Matrize ist es leicht eine geeignete Position für jeden Zahn zu finden. Die Matrize hat einen zervikalen Rand, der sich in die weiche Gewebetasche einfügt. Anwendungsgebiete: Klasse IV, Große Klasse III, Schließung von Diastema.

Anleitung: Nach der Präparation der Kavität, legen Sie sorgfältig das Matrizenband an, so dass die kurze Seite sich in die Tasche drückt. Durch längs Drücken / Ziehen suchen Sie die ideale Position für die beste proximale Form. Schneiden Sie die Matrize nach der entgeltigen Platzierung kürzer küryer, wenn nötig. Das Design stabilisiert die Matrize während des gesamten Prozesses. Das Band kann, indem man es auf der palatinalen Oberfläche wieder in den Zahnzwischenraum auf der anderen Seite befestigt, stabilisiert werden. Diese Technik kann auch für doppelproximale Füllungen verwendet werden.

**Identifizierung von Kontaktpunkten auf
Kronen und Brücken war noch nie einfacher!**
Der neue Directa SpotIt ist eine farbige Markierung auf einem geraden und abgewinkelten Handgriff.

4 Gründe für SpotIt® Kronen und Brücken Kontaktpunktfinder

#1 Genaue Angabe zur Einstellung der Kronen und Brücken

Spot it vereinfacht die Anpassung der Kontaktpunkte von Kronen und Brücken. Genaue Markierung der Kontaktpunkte.



#3 Optimaler Zugriff

Optimaler Zugriff durch gerades und abgewinkltes Design.

#2 Einfache Handhabung

Einfach zu bedienen - keine Hilfsmittel nötig. Zeitsparend und sehr präzise.



#4 Klare Indikation

Klare und saubere Markierung, hinterläßt keine Spuren außerhalb der Kontaktfläche. Kann ohne Hilfsmittel verwendet werden.

SpotIt®

Prod No	Product Description	Quantity
690112	SpotIt Assortment	9+9 pcs
690110	SpotIt Refill Straight	18 pcs
690111	SpotIt Refill Angled	18 pcs

Kronen und Brücken Kontaktpunktfinder für passgenaue Prothetik.

SpotIt®
Design by Dentists™



1. Legen der Krone oder Brücke.



2. Drücken Sie SpotIt über den Kontaktpunkt, um die Anzeigemarkierung zu erhalten.



3. Genaue Angabe, wo Nacharbeit erforderlich ist.



4. Indikation nach Entfernen der Brücke.

Spot it Kronen und Brücken Kontaktpunktfinder

Identifizieren von Kontaktpunkten auf Kronen und Brücken war noch nie so einfach.

Vor der Zementierung von konventionellen Kronen, Brücken und Implantaten, ist es notwendig, das Verhältnis der Krone zu den Nachbarzähnen zu beurteilen. Oft wird dazu Occlusionspapier verwendet, um die Kontaktstelle zu überprüfen. Dieses Verfahren zeigt jedoch eine zu breiten und ungenauen Kontaktpunkt an, mit dem nachfolgenden Risiko einer übermäßigen Regulierung.

Der neue Kontaktpunkt-Finder ist eine farbige Markierung auf Floss in gerader und gewinkelter Form. Als Markierung für den Kontakt zwischen dem Prothesenelement und dem benachbarten Zahn gibt es eine klare und genaue Angabe der Einstellung für einen perfekten Kontaktpunkt. Die ganze Markierung kann ohne Hilfsmittel durchgeführt werden - halten Sie die Krone mit einer Hand und SpotIt mit der anderen Hand.

Identifizieren von Kontaktpunkten auf Kronen und Brücken war noch nie einfacher!

Straight



Angled

