

Fit Strip™

Flexible
Interproximal finishers with a
Twist

Nuove

Strisce abrasive diamantate subgengivali

Le strisce Fitstrip™ subgengivali sono state perfettamente disegnate per rimuovere velocemente ed in modo sicuro le sporgenze in composito e gli eccessi di cemento dalle zone subgengivali difficilmente raggiungibili. Queste strisce sono il 33% più strette e solo 2,5 mm in altezza rispetto alle altre strisce Fitstrip™ e grazie alla zona centrale di sicurezza "non-abrasiva", scorre facilmente tra i denti e sotto la zona di contatto. La diamantatura media, fine e superfine rende veloce la rifinitura e la finitura liscia come la seta.

Comodo manico! Il manico Fitstrip™, comodo e semplice da avvitare, fa la differenza, sia per l'odontoiatra che per il comfort del paziente

Ruota! Ruota il supporto rotondo colorato per regolare la curvatura delle strisce Fitstrip™, si blocca automaticamente.

Pronte per una maratona! Le strisce Fitstrip™ sono molto resistenti e durature. Restano abrasive e pronte all'uso anche dopo più cicli di autoclave

Rimuovere, sgrossare e rifinire

1. Grana media per rimozione rapida
2. Grana fine per sgrossatura
3. Grana superfine per una perfetta lucidatura

Focus stretto

- 33% più strette delle strisce Fitstrip™ standard
- altezza solo 2,5 mm.

Stay in the zone

- La zona di sicurezza "non-abrasiva" protegge la zona dei punti di contatto
- Super sottile – solo 0,05 mm
- Scorre facilmente ed in modo sicuro tra i denti

Fit Strip™

Flexible
Interproximal finishers with a
Twist



NUOVE!



Tecnica subgingivale :

1. Inserire tra i denti. Iniziando dalla grana media (blu), ruotare il supporto colorato fino a quando la striscia è bloccata dritta. Posizionare la "zona di sicurezza" nello spazio interprossimale interessato. Con una leggera pressione apicale e muovendo avanti e indietro, inserire la striscia tra i denti*. Il supporto colorato adesso può essere ruotato per posizionare la striscia in posizione curva, in modo che la stessa possa seguire l'anatomia del dente.
2. Rimuovere le sporgenze e gli eccessi di cemento. Muovere la striscia Fitstrip™ in direzione buccale-linguale e avanti/indietro. Rimuovere la striscia e testare l'area con un floss per assicurarsi il risultato desiderato. Ripetere se necessario.
3. Finitura e lucidatura. Posizionare la striscia Fitstrip™ fine (rossa) nello spazio interprossimale usando la tecnica del punto 1. Muovere delicatamente la striscia avanti/indietro buccale/linguale tre o quattro volte. Rimuovere la striscia fine e ripetere la stessa procedura con la striscia superfine (gialla) per una lucidatura ideale.

*se i denti sono incollati uniti o il contatto è troppo stretto, potete usare la striscia seghettata (grigia) per aprire l'accesso e poi inserire la striscia con la "zona sicurezza" 0,05 mm tra i denti.

Kit Fitstrip™ finitura subgingivale e strisce monolaterali

Il kit FPSK08 contiene :

- 2 manici
- 10 strisce : 2 subgingivali superfini, 2 subgingivali fini, 1 subgingivale media, 1 striscia seghettata, 1 striscia monolaterale per ciascuna granulometria 0,08 mm – 0,10 mm – 0,13 mm – 0,18 mm

Kits Tutti i kit contengono 10 strisce e 2 manici

NUOVO Kit finitura subgingivale 3 strisce subgingivali fini, 3 subgingivali medie, 3 subgingivali superfini e 1 striscia seghettata	FPSK07	€ 159
NEW Kit Fitstrip finitura subgingivale e strisce monolaterali 2 manici, 10 strisce : 2 subgingivali superfini, 2 subgingivali fini, 1 subgingivale media, 1 striscia seghettata, 1 striscia monolaterale per ciascuna granulometria 0,08 mm – 0,10 mm – 0,13 mm – 0,18 mm	FPSK08	€ 159

Ricambi	Monolaterale	Bilaterale	Prezzo confez. 4 pz
Super fine 15 Micron 	FPSXFSS-4 spessore 0,08 mm	FPSXFDS-4 spessore 0,11 mm	€ 73
Fine 30 Micron 	FPSFSS-4 spessore 0,10 mm	FPSFDS-4 spessore 0,15 mm	€ 73
Media 46 Micron 	FPSMSS-4 spessore 0,13 mm	FPSMDS-4 spessore 0,21 mm	€ 73
Grossa 90 Micron 	FPCS-4 spessore 0,18 mm	FPCDS-4 spessore 0,30 mm	€ 73
Seghettata 	FPSSAW-4 spessore 0,05 mm		€ 73
Super fine 15 Micron 	FPSGXFSS-4 spessore 0,08 mm	N/A	€ 73
Fine 30 Micron 	FPSGFSS-4 spessore 0,10 mm	N/A	€ 73
Media 46 Micron 	FPSGMSS-4 spessore 0,13 mm	N/A	€ 73
Manici Fitstrip™ ricambi (2 pz) codice FPSHANDLE-2			€ 30

Garrison
Dental Solutions

Numero verde 800-986225

contactme@garrisondental.com

www.garrisondental.com



Mention Code
EMITFSSG20